

## Гарантійне обслуговування

Шановний клієнте!

Перш за все, дякуємо Вам за вибір нашого продукту. З метою покращення нашого обслуговування, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть свій гарантійний талон після покупки.

**У ГАРАНТІЙНОМУ ВИПАДКУ  
ТЕЛЕФОНУЙТЕ  
067-492-30-80**

ПРОДУКТ \_\_\_\_\_

ДАТА ПОКУПКИ \_\_\_\_\_

З умовами гарантії згіден (-на)

\_\_\_\_\_ (прізвище покупця)

\_\_\_\_\_ (підпис покупця)

СПД Корнєєв Владислав Юрійович  
р/р 26009052656291  
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ  
МФО 320649, Код ЄДРПОУ 2943704895  
Свідоцтво про реєстрацію  
20720000000041215 від 13.11.2017 р.  
Адреса: 03115, м. Київ, вул. Котельнікова  
25а, оф. 301, тел.: 067-492-30-80

Продавець СПД Корнєєв В. Ю.  
Прізвище, підпис продавця \_\_\_\_\_ Корнєєв  
В. Ю.



**Інструкція з експлуатації  
алкотестера Inspire ACT600**

Шановний покупцю! Дякуємо за вибір нашого продукту. Перед початком використання приладу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.

## Заходи безпеки

1. Рівень алкоголю в крові залежить від спадковості, фізичного стану, ваги та статі.
2. Проводьте вимірювання через кілька хвилин після вживання алкоголю. Це дозволить отримати більш точні результати.
3. Зберігайте прилад в оригінальній упаковці, в захищеному від впливу вологи та прямого сонячного проміння місці.
4. Не занурюйте пристрій в будь-яку рідину та оберігайте його від бризгів.
5. Чим частіше використовується прилад, тим швидше знижується рівень чутливості датчика.
6. Пристрій призначено лише для побутового використання. Отримані результати не можна використовувати в суді як доказ.

## Особливості моделі

1. Прилад розроблено та виготовлено відповідно до стандарту EN 16280.
2. Пристрій оснащено модулем датчика контролю дихання, що забезпечує більш точні результати вимірювання.
3. Прилад підтримує 3 одиниці вимірювання: мг/л, ‰BAC та ‰BAC.

## Технічні характеристики

Діапазон вимірювання	0...1 мг/л (0...0.2% BAC), 0...1 г/л, 0...2% BAC)
Рівень спрацювання акустичного сигналу	0.24 мг/л (0.05% BAC, 0.5 г/л, 0.5% BAC)
Точність	5% від повної шкали
Час нагрівання	5 с
Час вимірювання	3-5 с
Збереження вимірювань	До 20 результатів
Дисплей	0,39 дюймів
Живлення	3 батарейки ААА
Температура	Робоча: 0-+50°C Зберігання: -20-+70°C
Розмір	145x38x33,5 мм
Вага	54 г

## Комплектація

- 1 x Алкотестер
- 5 x Мундштук
- 3 x Батарейка ААА
- 1 x Інструкція з експлуатації
- 1 x Оригінальна упаковка

## Усунення неполадок

**Проблема 1:** Алкотестер не вмикається.

**Причина 1:** Батарейки розрядилися.

**Вирішення:** Вставте нові батарейки.

**Причина 2:** Батарейки вставлені неправильно.

**Вирішення:** Вставте батарейки правильно.

**Причина 3:** Кнопка живлення не була затиснута 2 секунди.

**Вирішення:** Затисніть кнопку живлення на 2 секунди.

**Проблема 2:** Під час вимірювання на дисплеї з'явилось сповіщення про помилку.

**Причина:** Подих був не достатньо сильним чи коротким.

**Вирішення:** Виконайте повторне вимірювання. Тривалість подиху має становити принаймні 5 секунд.

**Проблема 3:** Результати вимірювань, отриманих за короткий проміжок часу, не співпадають.

**Причина 1:** Після вживання алкоголю минуло надто мало часу.

**Вирішення:** Щоб отримати точні результати, проводьте вимірювання через 20 хвилин після вживання алкоголю.

**Причина 2:** Ротову порожнину було прополоскано не водою.

**Вирішення:** Прополосніть ротову порожнину водою.

## Зовнішній вигляд



## Користування

1. Перед вимірюванням не вживайте алкоголь та не паліть принаймні 20 хв. Ополосніть ротову порожнину водою.
2. Затисніть кнопку живлення на 2 секунди, щоб увімкнути алкотестер. Зачекайте 19 секунд, поки прилад прогріється. На дисплеї почне блимати повідомлення «bLo» і будуть звучати звукові сигнали.



Прилад готовий до вимірювання

3. Видихайте повітря через мундштук протягом 5 секунд. Якщо вимірювання виконано правильно, прозвучить 2 звукових сигнали, а на дисплеї з'явиться результат.

**Примітка:** Якщо протягом 25 секунд не розпочати вимірювання, прилад автоматично вимкнеться.



Початковий етап вимірювання

Основний етап вимірювання

Кінцевий етап вимірювання

**Примітка:**

- Щоб отримати точні результати вимірювання, видихати повітря у мундштук потрібно повільно та безперервно.
- Якщо вимірювання було виконано неправильно, на дисплеї з'явиться повідомлення «Err». Щоб виконати нове вимірювання, натисніть кнопку живлення.



Помилка вимірювання (видих був уривчастим)




Результати вимірювання

Щоб повторити вимірювання, знову натисніть кнопку живлення.

## Порівняльна таблиця одиниць вимірювання

Концентрація алкоголю		
в диханні (BгАС)	у крові (BAC)	
мг/л	‰ BAC	% BAC
0.000	0.00	0.000
...	...	...
0.025	0.05	0.005
...	...	...
0.050	0.10	0.010
...	...	...
0.095	0.19	0.019
0.100	0.20	0.020
0.105	0.21	0.021
...	...	...
0.245	0.49	0.049
0.250	0.50	0.050
0.255	0.51	0.051
...	...	...
0.400	0.80	0.080
...	...	...
0.500	1.00	0.100
...	...	...
1.000	2.00	0.200

блимає значення «-01-», а потім – значення 0.50‰ ВАС. Якщо результат 2 вимірювання ще не збережено, то спершу на дисплеї блимає значення «-02-», а потім – значення «----».

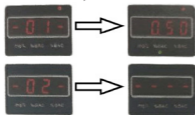

**Примітка:** У разі заміни батарейок всі збережені результати будуть видалені.

## Заміна батарейок

Коли заряд батарейок знизиться до критичного рівня, на дисплеї 10 раз блимне повідомлення «Lob», а потім пристрій вимкнеться. Щоб продовжити вимірювання, вставте нові батарейки.



Низький заряд батарейок

## Одиниця вимірювання

Прилад підтримує 3 одиниці вимірювання: мг/л, ‰ВАС та ‰ВАС. Щоб обрати бажану одиницю вимірювання, натисніть кнопку «Вибір одиниці вимірювання». Після налаштування одиниці вимірювання нові результати будуть відображатися в цій одиниці вимірювання.



**Примітка:** В деяких моделях непередбачена функція зміни одиниці вимірювання.

Якщо отриманий результат вимірювання перевищує рівень тривоги, індикатор сповіщень блимає 10 раз та лунає звуковий сигнал. Якщо результат вимірювання не перевищує рівень тривоги, індикатор сповіщень починає горіти зеленим кольором.

Діапазон вимірювання: 0.00-2.00‰ВАС.

Значення «2.00‰ВАС» відображається, якщо результат вимірювання перевищує значення «2.00‰ВАС».

Значення «0.00‰ВАС» відображається, якщо результат вимірювання не перевищує значення «0.05‰ВАС».

Наприклад, якщо значення «0.50‰BAC» встановлено як рівень тривоги, результат буде відображено так:



< 0.50 ‰BAC



≥ 0.50 ‰BAC

## Налаштування рівня тривоги

Щоб перейти до налаштувань рівня тривоги, у режимі прогрівання натисніть кнопку живлення 2 рази. Натисніть кнопку «Вибір одиниці вимірювання», щоб обрати бажаний рівень тривоги b2, b3, b5 чи b8. Потім натисніть кнопку живлення, щоб підтвердити налаштування та активувати режим вимірювання.



**Примітка:** Рекомендуємо не змінювати значення рівня тривоги, встановлене за замовчуванням, без особливих потреб.

## Таблиця порівняння рівня тривоги і результатів вимірювання

Рівень тривоги	Результати	Сповіщення	Індикатор сповіщень
b2	C < 0.20‰ BAC; 0.020% BAC; 0.100 мг/л	Немає	Немає сповіщення: індикатор горить зеленим кольором
	C ≥ 0.20‰ BAC; 0.020% BAC; 0.100 мг/л	Є	
b3	C < 0.30‰ BAC; 0.030% BAC; 0.150 мг/л	Немає	Є сповіщення: індикатор блимає 10 раз червоним кольором і звучить звуковий сигнал
	C ≥ 0.30‰ BAC; 0.030% BAC; 0.150 мг/л	Є	
b5	C < 0.50‰ BAC; 0.050% BAC; 0.250 мг/л	Немає	
	C ≥ 0.50‰ BAC; 0.050% BAC; 0.250 мг/л	Є	
b8	C < 0.80‰ BAC; 0.080% BAC; 0.400 мг/л	Немає	
	C ≥ 0.80‰ BAC; 0.080% BAC; 0.400 мг/л	Є	

## Пам'ять останніх вимірювань

Алкотестер зберігає 20 останніх результатів вимірювань. Щоб переглянути їх, затисніть кнопку «Вибір одиниці вимірювання» на 2 секунди. У меню пам'яті останніх вимірювань натискайте кнопку «Вибір одиниці вимірювання», щоб переглянути останні результати. Наприклад, якщо результат 1 вимірювання становить 0.50‰ BAC, то спершу на дисплеї